

Slik bruker du Inuxair NEXThaler-inhalatoren

Les hele instruksjonen før du starter å bruke inhalatoren. Kontakt din lege, sykepleier eller apoteket hvis du har problemer med å bruke inhalatoren eller om du har spørsmål om din behandling.



Trinn 1. ÅPNE

1. Hold inhalatoren fast i oppreist stilling.
2. Sjekk antall doser som er igjen: et tall mellom "1" og "120" viser at det er doser igjen. Hvis dose-teller vinduet viser "0" er det ingen doser igjen – kast inhalatoren din og få en ny.
3. Åpne dekselet helt.
4. Før du inhalerer skal du puste ut så langt det er behagelig. Ikke pust ut gjennom inhalatoren.




Trinn 2. INHALER

1. Løft inhalatoren opp til munnen din og legg leppene rundt munnstykket.
 - Ikke dekk til luftventilen når du holder inhalatoren.
 - Ikke inhaler gjennom luftventilen.
2. Ta en kraftig og dyp inhalasjon gjennom munnen.
 - Du kan oppleve en smak når du skal ta dosen.
 - Du kan høre eller føle et klikk når du skal ta dosen.
 - Ikke pust inn gjennom nesene.
 - Ikke ta inhalatoren vekk fra leppene under innånding.
3. Fjern inhalatoren fra munnen.
4. Hold pusten i 5 til 10 sekunder eller så lenge det er behagelig.
5. Pust sakte ut. Ikke pust ut gjennom inhalatoren.



Trinn 3. LUKK

- Sett inhalatoren tilbake til oppreist stilling, og lukk dekselet helt.
- Sjekk at dosetelleren har talt ned med én.
- Hvis du må ta flere doser, gjenta trinn 1-3.

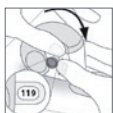

ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER

Ikke ta inhalatoren ut av posen hvis du ikke har tenkt å bruke den umiddelbart.

Bruk inhalatoren kun som beskrevet.

Ha dekselet lukket inntil du trenger å ta en dose fra inhalatoren.

Når du ikke bruker inhalatoren, oppbevar den på et rent og tørt sted.

Ikke prøv å ta Nexthaler inhalatoren fra hverandre, uansett årsak.

Ikke bruk Nexthaler-inhalatoren

- etter siste bruksdato
- hvis det har gått over 6 uker siden posen ble åpnet
- hvis den er i stykker
- hvis dosetelleren viser 0
- hvis du ikke kan lese tallet på dosetelleren

I disse tilfellene skal du kassere inhalatoren eller returnere den til apoteket og erstatte den med en ny.

FØR DU BRUKER EN NY NEXTHALER INHALATOR

1. Åpne posen og ta ut inhalatoren din.
 - Ikke bruk inhalatoren dersom posen ikke er forseglet eller den er skadet, lever den tilbake og få en ny.
 - Bruk etiketten på boksen til å skrive ned datoen da du åpnet posen.
2. Inspisere inhalatoren din.
 - Hvis inhalatoren ser ødelagt eller skadet ut, lever den tilbake og få en ny.
3. Sjekk dose-teller vinduet. Hvis inhalatoren er helt ny, vil du se "120" i dose-teller vinduet.
 - Ikke bruk en ny inhalator hvis antallet som vises er mindre enn "120", lever den tilbake og få en ny.

HVORDAN BRUKER DU DIN NEXTHALER INHALATOR

- Dersom du er usikker på om du får i deg dosen korrekt, skal du kontakte apoteket eller legen.
- Dersom du er usikker på om dosetelleren har talt ned etter inhalasjonen, vent til din neste planlagte dose og ta denne som normalt. Du må ikke ta en ekstra dose.

Åpne

1. Hold inhalatoren fast i oppreist stilling.
2. Sjekk antall doser som er igjen: et tall mellom "1" og "120" viser at det er doser igjen.

3. Hvis dose-teller vinduet viser "0" er det ingen doser igjen – kast inhalatoren din og få en ny.
4. Åpne dekselet helt.
5. Før du inhalerer skal du puste ut så langt det er behagelig. Ikke pust ut gjennom inhalatoren.

RENGJØRING

- Vanligvis er det ikke nødvendig å rengjøre inhalatoren.
- Om nødvendig kan du rengjøre inhalatoren etter bruk med en tørr klut eller papir.
- Ikke rengjør inhalatoren med vann eller andre væsker. Hold den tørr.

OPPBEVARING OG DESTRUKSJON

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen, posen og etiketten etter Utløpsdato.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Etter første gangs åpning av posen: Oppbevares ved høyst 25°C.

Etter tredje gangs åpning av posen skal legemidlet brukes innen 6 måneder.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

NOTATER



felleskatalogen.no

Chiesi Pharma AB | chiesi.no
+46 8 753 35 20 | infonordic@chiesi.com